

# Coagulometro Veterinario PoCT

- Semplicità e immediatezza d'uso.
- Risultati affidabili.
- Card a secco con sangue intero.
- Portabilità 100%.
- Batterie al litio ricaricabili.



## PREGI



- Sistema di misurazione ottico "Golden Standard".



- Conservazione dei kit a temperatura ambiente.



- Semplicità d'uso senza manutenzione.



- Accuratezza e affidabilità dei risultati.



## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



Il reagente specifico è già predosato a secco sulla card.

Dopo una rapida incubazione e l'aggiunta del campione, lo strumento procede con una miscelazione automatica fino alla formazione e rilevamento del coagulo.

Il risultato del Test eseguito apparirà sul display touch screen e potrà essere memorizzato e stampato.

## APPLICAZIONI



- Screening dell'attività coagulativa della via intrinseca e estrinseca.
- Monitoraggio T.A. e veleni ad azione scagulante.
- Monitoraggio di patologie quali tumori, bruciate, infezioni e epatiti.
- Monitoraggio della coagulazione intravascolare, trombotici e relativa terapia.

## TEST DISPONIBILI



TEST	VOLUME CAMPIONE	RANGE DI RIFERIMENTO		TEMPERATURA CONSERVAZIONE	SCADENZA (MESI)	REF. (12 PEZZI)
		CANE	GATTO			
PT	20µL	5-15s	6-15s	4°~30°C	18	V211
INR	20µL	INR: 0.5-1.6	INR: 0.5-1.6	4°~30°C	18	
APTT	20µL	5-45s	15-43s	4°~30°C	18	V212
FIB	20µL	1-3g/L	1-2.5g/L	4°~30°C	18	V213
TT	20µL	10-100s	10-100s	4°~30°C	18	/
ACT	20µL	50-150s	50-140s	4°~30°C	18	/

## STEP BY STEP




Accensione



Riscaldamento



450µL di campione, mescolare  
Inserire la Card

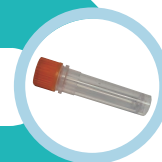

Fine test



Elaborazione del Risultato



dispensare 20µL di campione  
Esecuzione